

ノボケア ニュース

No.13

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



NovoCare®

ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）
午前9時～午後6時

ペンニードルをご使用の皆様へ

1. ペンニードルは滅菌済みの一回限りの使い捨て注射針です。

針は痛みが少ないように非常に細くなっておりますので、一度使うと針先が反るようにまくれたり、潤滑剤が剥がれたりすることがあります。


従って、複数回使用すると非衛生的であるばかりでなく、痛みが増し、針の強度が落ちて折れる可能性もありますので、複数回の使用はおやめください。

2. ペンニードルは注射直前に取り付け、注射後すぐに外してください。

注射回数が多い患者さまなどでペンニードルを付けっぱなしにされる方がいらっしゃいますが、キャップを付けていても温度や気圧の変化で液漏れすることがあります。また、カートリッジに空気が入ったり、ゴムピストンがピストン棒から離れたりして、設定量が正しく注射されないことがあります。また、インスリンが針の中で固まり、針詰まりが起きることもあります。


3. 白い針キャップは真っ直ぐ引っぱって外してください。

注射針は真っ直ぐの状態で作られています。針キャップを斜めに引っ張ると針先が曲がってしまいます。

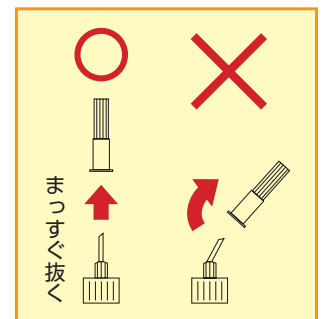

4. ペンニードルは真っ直ぐ注入器に取り付けてください。

インスリン注射に慣れた方でも、ペンニードルを斜めから取り付ける方がいらっしゃいます。斜めから取り付けると「後針」がゴム栓の真ん中に刺さらず、そのまま回して取り付けると針が折れ曲がったり、根元から折れたりします。（後針はゴム栓を貫通する大事な針で、製造時には真っ直ぐ付いておりますので、保護シールを外した時に折れ曲がっていることはありません。）

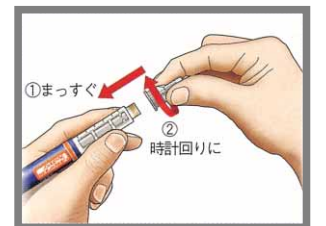

5. 針基部の形状を改良することで、注射針が従来品に比べて破断しにくくなりました。

