

# ノボケア ニュース

No.15

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



NovoCare®

ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）  
午前9時～午後6時

## 汚れの付着によるフレックスペンへの影響について

フレックスペンの単位合わせダイヤル（単位数字が書かれている部分）や注入ボタンなどに汚れが付着すると、注入時の摩擦力が増加し、注入ボタンが押しにくくなったり、押せなくなったりすることがあります。汚れが付着しないように、ご使用および保管してください。

### 茶色の汚れが付着した例



### 白色の汚れが付着した例



## 汚れの付着を防ぐための注意点

汚れや液体などが付着しない場所で、ご使用および保管してください。

フレックスペンの単位合わせダイヤルや単位目盛の部分などに汚れが付着すると、注入時の摩擦力が増加することがあります。特に、液体が付着した場合、時間の経過とともに水分が蒸発して、粘性が高まり、摩擦力が増加することがあります。

注射後は、注射針を外して保管してください。

注射針を装着したまま保管すると、針先からインスリンが漏れることがあります。さらに、漏れたインスリンが乾燥して粉末状態になり、摩擦力が増加することがあります。