

# ノボケア ニュース

No.16

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363




ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）  
午前9時～午後6時

## ゴムピストンとピストン棒の間に隙間が生じる現象について

注射針を装着したまま保管した場合やカートリッジがひび割れた場合、ゴムピストンとピストン棒の間に隙間が生じることがあり、正確な注射ができなくなります。さらに、隙間が生じた状態で注入ボタンが押された場合、ピストン棒先端の円盤が正しい位置から外れることもあります。隙間が生じないように、正しい方法で使用および保管してください。

### ゴムピストンとピストン棒の間に隙間が生じた製剤

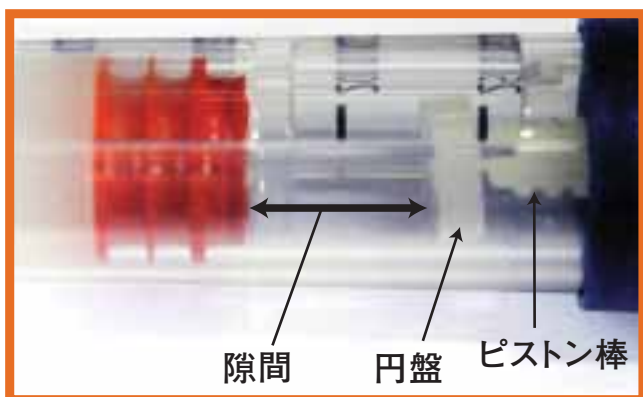

### 円盤が正しい位置から外れている製剤



## 隙間が生じる現象を防ぐための注意点

注射針を装着したままの保管は避けてください。

針先から液漏れが発生し、ゴムピストンが前進して隙間が生じることがあります。

製品に強い衝撃を与えないように注意してください。

カートリッジがひび割れた箇所から液漏れが発生し、ゴムピストンが前進して隙間が生じることがあります。