

ノボケア[®] ニュース

No.17

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）
午前9時～午後6時

注射後は必ず注射針をはずしてください。注射針は毎回新しいものを、必ず注射直前に取り付けてください。

●針を付けたままにすると、液漏れをおこすことがあります。

液漏れにより、ピストン棒とゴム栓の間に隙間ができたり（図1参照）、ワッシャー（円盤）が外れたり（図2参照）、カートリッジ内に気泡ができってしまう可能性があります。

この結果、設定した単位の薬液が注射できなかったり、薬液の濃度が変わってしまうことがあります。

図1

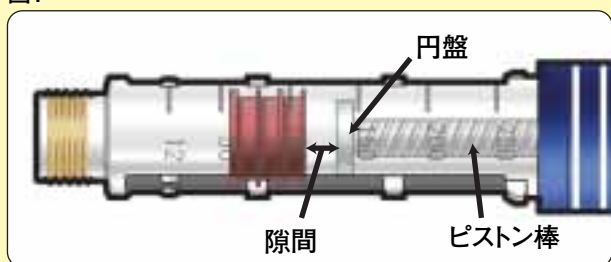


図2



●針を付けたままにすると、針詰まりがおきる場合があります。

針の中で薬液の水分が蒸発し、固まってしまう場合があります。

●針を付けたままにしたり、同じ注射針を複数回使用したりすると、感染の原因となるおそれがあります。

針を刺したままにしていることで、雑菌が薬液の中に入ってしまうおそれがあります。

●新しい注射針ではなく数回同じものを使用すると、痛みが強くなったり、折れやすくなったりすることがあります。

新しい注射針ではなく数回同じものを使用すると、針先が傷んだり、変形して、注射時の痛みが強くなる可能性があります。また、複数回の使用により針の強度が落ち、曲がりやすくなったり、折れやすくなったりする可能性があります。