

ノボケア ニュース

No.8

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



NovoCare®

ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）
午前9時～午後6時

インスリン治療をされている皆様へ

空打ちは、確実にインスリンを注射するための大事な操作です。注射の前には必ず空打ちをして、液が出ることを確認してください。これにより、お使いの注入器及び注射針が正常に動作しているかどうか確認できます。

「液が出ない」「注入ボタンが押せない・重い・途中で止まる」という場合、ほとんどは「針が正しく装着されていない」ことが原因です。


- (1) 注射針（ペンニードル）はまっすぐ取り付け、ネジを最後までしっかりと回してください。
横からかぶせるように付けますと、後針（インスリンのゴム栓に刺さる針）が曲がったり、又は折れてしまい、ゴム栓を貫通しません。また、しっかりとついていないと血液が混入する恐れがあります。



- (2) 液が出ず、注入ボタンに抵抗を感じる場合は注射針が正しく装着されていない可能性が高いので、新しい注射針に交換してください。

毎回注射する前と、注射針を交換したときは必ず空打ちをして、液が出ることを確認してください。

空打ちの方法（フレックスペン®の場合）

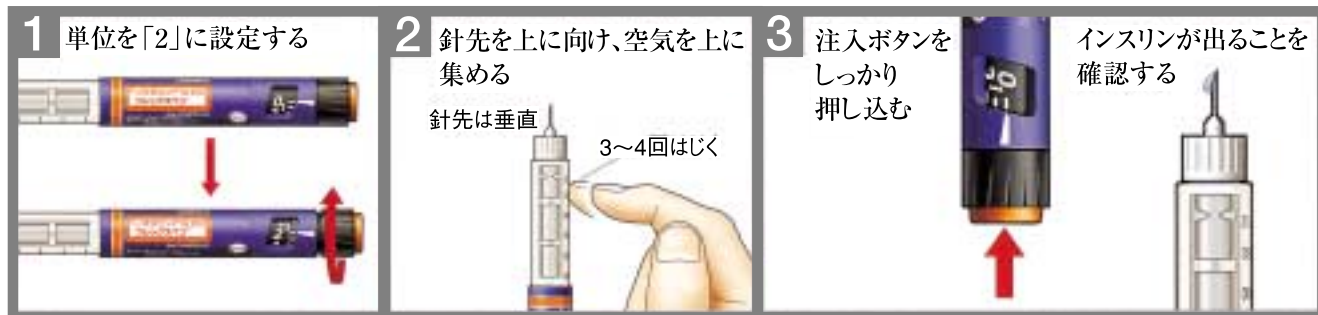

単位合わせダイヤルを矢印の方向に回して「2」に合わせます。

針先を上に向けてフレックスペン®を持ちインスリンカートリッジの上部を軽く3~4回はじきます。

針先を上に向けたまま注入ボタンを押し込みます。針先からインスリンが出て、ダイヤル表示は「0」に戻ります。

インスリンが出ない場合は、③の操作から繰り返してください。とくに、新しい製品の場合は、液が出るまでに数回繰り返さなければならぬことがあります。