

# ノボケア ニュース

No.10

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363




受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）  
午前9時～午後6時

上記以外の時間は下記の電話で受け付けます。  
夜間・休日受付センター 0120-359516  
(但し、原則として回答は翌営業日となります。)

## フレックスペンをご使用の皆様へ


注入ボタンの押しかたによっては重くなりますので、下記の点にご注意ください。

### 正しい押し方

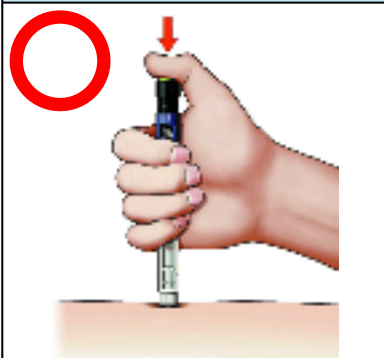

フレックスペンは注入ボタンを真上からまっすぐに押し込んで、インスリンを注入してください。

### 高単位の方へおすすめ

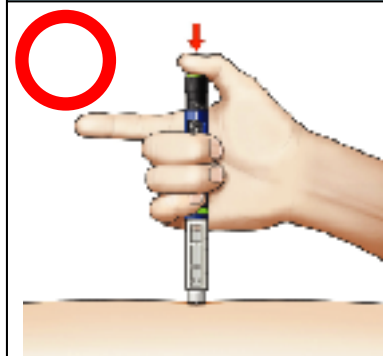

フレックスペンは、精度を高くするためや、目盛表示を大きくするために従来の製品より注入ボタンが長く伸びる設計になっております。高単位であったり、手が小さいなど注入ボタンに指が届きにくい場合は、人差し指を浮かせて3本の指で握ると押しやすくなります。

### 抵抗をつくって重くなる



フレックスペンは注入ボタンを押すと、単位合わせダイヤルが0（ゼロ）方向に回りながら下がる構造です。そのため、ダイヤル部分に注入ボタンを押す指が触れていたり、注入ボタンを斜めから押し込もうとすると、この回転をブロックすることになり、抵抗をつくりながら注入ボタンを押していることとなります。

### 押し込めなくなる



ダイヤルの印字部分と本体の間に指が入っていたり、単位が表示される窓を指で抑えていると、注入ボタンが押し込めなくなります。

また、一度凍結しますとゴム栓が飛び出したり、気泡がたくさん発生したり、内部の部品が破壊されて注入ボタンが重くなったり動かなくなることがあります。冷蔵庫で凍結させないようにしてください。