

# ノボケア ニュース

No.11

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）  
午前9時～午後6時

上記以外の時間は下記の電話で受け付けます。  
夜間・休日受付センター 0120-359516  
(但し、原則として患者は翌営業日となります。)

## ペンニードル®をご使用の皆様へ


ペンニードル®を使ってインスリン注射を行う際には、次のことがらに気をつけましょう。

① 他の人が使用したり、他の人の体に刺さったペンニードル®を使用したりすると、感染症の原因となることがあります。



- 他の人が使用したペンニードル®は、絶対に使用しないでください。
- 誤って自分や他人をペンニードル®で傷付けないように、十分注意しましょう。
- 使用済みの注射針は、医療機関等の指導に従って、危険のないように処理しましょう。

② 開封後の操作で一度曲ってしまったペンニードル®は絶対に使用しないでください。  
曲がった状態のまま使用したり、曲がった針を元に戻して注射したりすると、針が折れ、折れた針が体内に残ってしまうことが稀にあります。

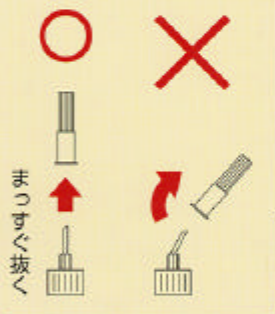


- 針キャップは、注射針からまっすぐ抜いて取り外しましょう。  
(針が細いため、針キャップに触れると曲がる場合があります。)

- 注射する前の取扱いにおいて、ペンニードル®の針部分には触らないようにしましょう。
- 針キャップを取り外した後は、ペンニードル®が衣服に触れるなどして針を曲げたり傷つけたりしないように、十分注意して取り扱しましょう。

③ 1回限りの使用です。再使用しないで下さい。

④ 使用期限をすぎたペンニードル®は使用しないでください。  
ペンニードル®の使用期限は、注射針の保護シールに印字されています。

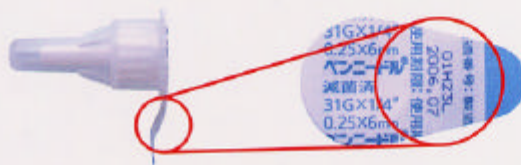

⑤ 使用する注入器の使用説明書をよく読んだ上で使用しましょう。

よく読んで  
ください

使用  
説明書

