

使い終わった製剤について

使い終わった製剤(薬液がなくなった製剤)は、単位合わせダイヤルを回すことができません。新しいものに交換し、空打ちした後、主治医に指示された単位を注射してください。フレックスタッチ® / フレックスペン® / イノレット® / ノボペン® (ペンフィル® を取り付ける注入器)は、インスリンカートリッジ内の残量以上の単位を設定できない構造となっております。

使い終わった製剤(薬液がなくなった製剤)は、ピストン棒ならびにゴムピストンが最後の位置まで進んでおり、外観から判断することができます。こちらの写真をご覧ください。

使い終わった製剤(薬液がなくなった製剤)

