

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.23

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

## インスリンペン型注入器フレックスタッチ<sup>®</sup>を より安心してお使いいただくために

**注入ボタンが押せても薬液が出ていない可能性があります。**

**インスリン本体のゴム栓に刺さる針が曲がって折れていても、  
注入ボタンが押せてしまうことにご注意ください！**



いつも通り注入ボタンは押せたとし、  
目盛りも0まで戻っているから注射完了！




ちょっと  
待って！



でも、注射針を正しく  
装着できていないと  
薬液が出ていないことが  
ありますよ。

### 安心のための3つのポイント

- ① 毎回、針を注射直前に取り付ける
- ② 針はまっすぐに取り付ける
- ③ 空打ちをして、  
薬液が出ることを目で見確認する

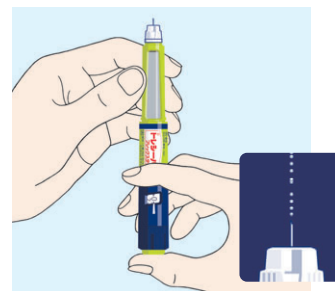

このノボケアニュースは、インターネットで検索して  
ご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

検索