

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ 使い終わった製剤について

使い終わった製剤（薬液がなくなった製剤）は、単位合わせダイアル / ダイアルを回すことができません。新しいものに交換し、空打ちした後、主治医に指示された投与量を注射してください。

フレックスタッチ® / イノレット® / フレックスペン® / ビクトーザ® ペン* / ノボペン®（ペンフィル®を取り付ける注入器）は、カートリッジ内の残量以上の投与量を設定できない構造となっております。（*「ビクトーザ®皮下注18mg」のペン型注入器部分の呼称）

使い終わった製剤（薬液がなくなった製剤）は、ピストン棒ならびにゴムピストンが最後の位置まで進んでおり、外観から判断することができます。こちらの写真をご覧ください。

使い終わった製剤（薬液がなくなった製剤）



ゴムピストン

ピストン棒

