

ノボケア[®] ニュース

No.18

NOVOCARENEWS

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ

薬液の変色や沈殿物が生じる現象について

原因として、カートリッジ内に**血液が混入**したことが考えられます。

透明な薬液に血液が混入した場合、薬液が変色したり、沈殿物が生じることがあります。

薬液が変色したり沈殿物が生じた場合は、使用を中止して、新しい製剤をご使用ください。

薬液が変色した例



沈殿物が生じた例



※沈殿物の色は赤に限りません。

血液混入を防ぐための留意点

ご使用中のカートリッジは注射針を通して皮下とつながるため、血液の混入を完全に防ぐことはできません。

しかし、以下の留意点を守っていただくと、血液混入を低く抑えることができます。

- **注射針をゴム栓にまっすぐ奥まで刺し、止まるまで回す。**
(注射針をしっかりと取りつけていないと、ゴム栓の弾性により血液が混入することがあります。)
- **血管への注射を避ける。**
- **注入後、注入ボタンを押したまま注射針を皮膚から抜く。**
(注射針を抜く前に注入ボタンを押している指の力を緩めると、血液が混入することがあります。)

なお、本製品の原材料及び製造工程におきましては、製剤の変色をきたす物質の使用及び工程は無く、保存中の変色といった製剤変化も無いことが確認されております。

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。
適正にご使用いただくための資料(ノボケアニュース)を掲載しております。

ノボケアニュース

検索

