

ノボケア[®] ニュース

No.22

NOVOCARENEWS

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ

注射針を注入器に取り付ける際の留意点

「液が出ない、注入ボタンが押しづらい、押せない」という場合、
多くは「注射針が正しく装着されていない」ことが原因です。




長年インスリンを使っているから、手技は問題ないよ！
針はいつも通りまっすぐ取り付けた。


注射針は正しく装着したと思っても、
注射針の後針（注入器のゴム栓に刺さる針）が
ゴム栓以外の部分に接触した場合、
以下の写真のような事象が認められる場合があります。



注射針には後ろ側にも針があります。

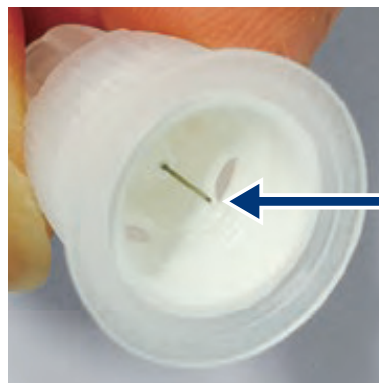


後ろ側の針

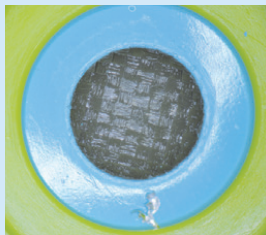

金属キャップの傷



折れた後針が
刺さっている

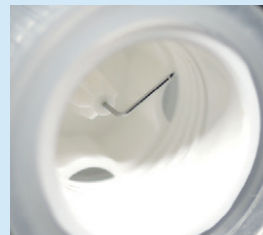

後針の折れ曲がり



後針の破損


正しい注射を行うために

- ✓ 注射針の後針が、ゴム栓にまっすぐ刺さるように意識して取り付ける。
- ✓ 必ず空打ちをして、薬液が針先から出ることを目で見て確認する。

新しい針をまっすぐに取り付けてください。



参考 まっすぐに取り付けるコツ

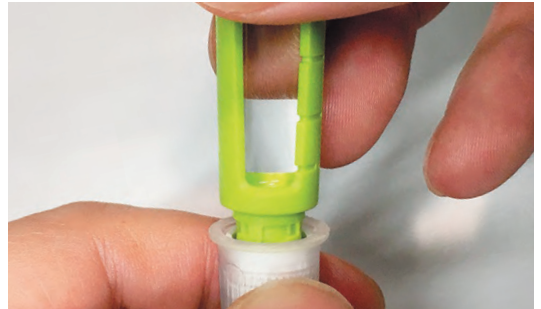

利き手で注入器を持ち、
注入器の方を注射針に刺すようにする。

手のふるえなどでまっすぐに取り付けることが難しい場合は以下の方法もお試しく下さい。



机の上で滑らせるように移動させる。



本などの折り目を利用して移動させる。

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。
適正にご使用いただくための資料(ノボケアニュース)を掲載しております。

ノボケアニュース

検索

