

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.26


NOVOCARENEWS

## ペンニードル<sup>®</sup>プラス 32G 4mmを ご使用の皆様へ


正しく皮下に注射するために 4mmの注射針は  
**皮膚面に対して垂直に、根元まで**刺してください。

**Point** 平らな針基をハンコのようにペタンと皮膚に貼り付けるように注射する


### ○ 皮下注射

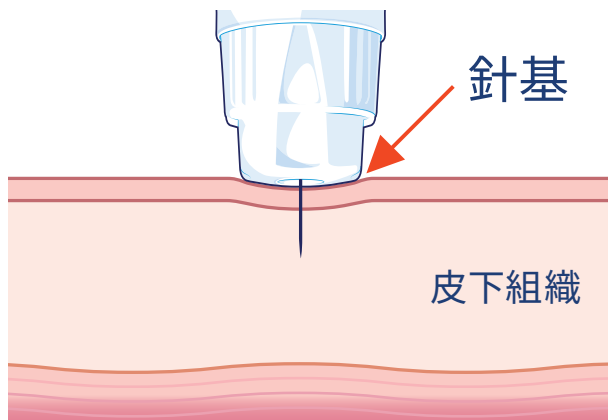

### × 皮内注射になる可能性があります

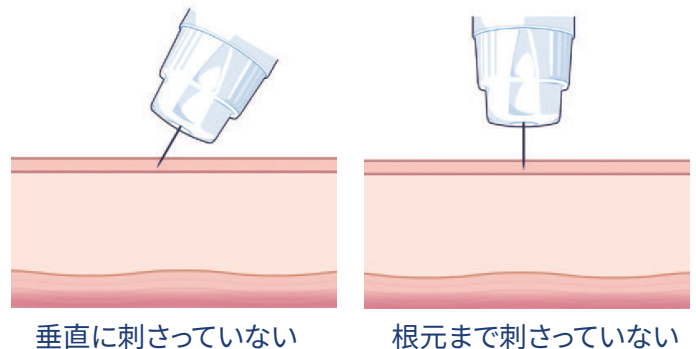

※皮内注射になると注射部位が膨れたり、  
痛くなったりする可能性があります。

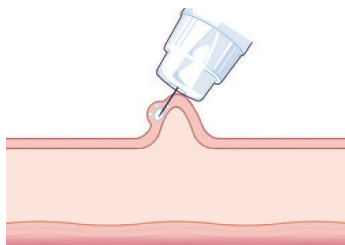

皮膚のつまみあげをして注射をすると、  
薬液が皮下に入らず、皮内注射や薬液漏れの原因に  
なる可能性があります。

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。  
適正にご使用いただくための資料(ノボケアニュース)を掲載しております。

ノボケアニュース

🔍 検索

