

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.18

NOVO CARE NEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



NovoCare<sup>®</sup>

ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ


## 薬液の変色や沈殿物が生じる現象について

ご使用中に薬液が変色した原因として、カートリッジ内に**血液が混入した**ことが考えられます。

また、透明な薬液に血液が混入した場合、沈殿物が生じることがあります。

薬液が変色した場合や、沈殿物が生じた場合、使用を中止して、新しい製剤をご使用ください。

### 薬液が変色した例

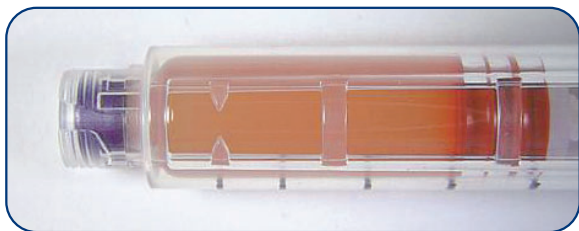

### 沈殿物が生じた例



### 血液混入を防ぐための 留意点

ご使用中のカートリッジは注射針を通して皮下とつながるため、血液の混入を完全に防ぐことはできません。しかし、以下の注意点を守っていただくと、血液混入を低く抑えることができます。

- **注射針をしっかりと取り付ける**  
(注射針をしっかりと取りつけていないと、ゴム栓の弾性により血液が混入することがあります。)
- **血管への注射を避ける**
- **注入後に注入ボタンを押したまま注射針を皮膚から抜く**  
(注射針を抜く前に注入ボタンを押している指の力を緩めると、血液が混入することがあります。)

なお、本製品の原材料及び製造工程におきましては、製剤の変色をきたす物質の使用並びに工程は無く、保存中の変色といった製剤変化も無いことが確認されております。

このノボケアニュースは、インターネットで検索してご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

検索