

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.23

NOVOCARENEWS

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ  
ペン型注入器フレックスペン<sup>®</sup>をより安心して  
お使いいただくために

注入ボタンが押せても薬液が出ていない可能性があります。  
カートリッジ本体のゴム栓に刺さる針が曲がって折れていても、  
注入ボタンが押せてしまうことにご注意ください！



いつも通り注入ボタンは押せし、  
目盛りも0まで戻っているから注射完了！



○ 良い例



まっすぐ取り付けた状態

× 悪い例 針が曲がって装着



後針の折れ曲がり




後針の破損

でも、注射針を正しく  
装着できていないと  
薬液が出ていないことが  
ありますよ。

## 安心のための3つのポイント

- ① 毎回、針を注射直前に取り付ける
- ② 針はまっすぐに取り付ける
- ③ 空打ちをして、  
薬液が出ることを目で見て確認する

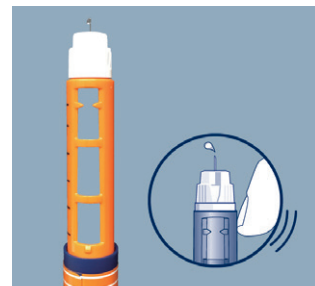

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。  
適正にご使用いただくための資料(ノボケアニュース)を掲載しております。

ノボケアニュース

検索

