

ノボケア[®] ニュース

No.23

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

インスリンペン型注入器フレックスペン[®]を より安心してお使いいただくために

**注入ボタンが押せても薬液が出ていない可能性があります。
インスリン本体のゴム栓に刺さる針が曲がって折れていても、
注入ボタンが押せてしまうことにご注意ください！**



いつも通り注入ボタンは押せたとし、
目盛りも0まで戻っているから注射完了！



ちょっと
待って！



でも、注射針を正しく
装着できていないと
薬液が出ていないことが
ありますよ。

安心のための3つのポイント

- ① 毎回、針を注射直前に取り付ける
- ② 針はまっすぐに取り付ける
- ③ 空打ちをして、
薬液が出ることを目で見て確認する



このノボケアニュースは、インターネットで検索して
ご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

検索