

ノボケア[®] ニュース

No.23

NOVOCARENEWS

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ
ペン型注入器フレックスタッチ[®]をより安心して
お使いいただくために

注入ボタンが押せても薬液が出ていない可能性があります。
カートリッジ本体のゴム栓に刺さる針が曲がって折れていても、
注入ボタンが押せてしまうことにご注意ください！



いつも通り注入ボタンは押せし、
目盛りも0まで戻っているから注射完了！



○ 良い例



まっすぐ取り付けた状態

× 悪い例 針が曲がって装着



後針の折れ曲がり




後針の破損

でも、注射針を正しく
装着できていないと
薬液が出ていないことが
ありますよ。

安心のための3つのポイント

- ① 毎回、針を注射直前に取り付ける
- ② 針はまっすぐに取り付ける
- ③ 空打ちをして、
薬液が出ることを目で見確認する

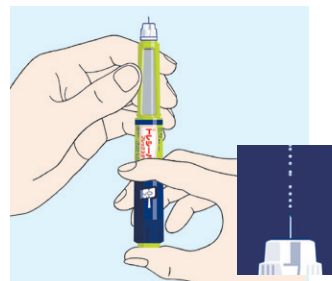

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。
適正にご使用いただくための資料(ノボケアニュース)を掲載しております。

ノボケアニュース

🔍 検索

