

ノボケア[®] ニュース

No.27

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

ビクトーザ[®]皮下注18mgをご使用されている皆さまへ

ビクトーザ[®]皮下注18mgを正しくお使いいただくために



ダイアルを最後まで回して注射しているよ!



ちょっと
待って!

数字を確認していますか?



注射の前にダイアル表示の数字を
目で見て確認してください。

2019年9月にデザインが変更になり、設定可能な最大量が0.9mgから1.8mgになりました。

0.9mg従来品



最後まで回した際の違い

✓ ダイアル表示の数字が
違います。

1.8mg対応品



✓ 注入ボタンの伸びてくる
長さが違います。

このノボケアニュースは、インターネットで検索して
ご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

検索