

ノボケア[®] ニュース

No.26

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363




NovoCare[®]

ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

ペンニードル[®] プラス 32G 4mmを ご使用の皆様へ

正しく皮下に注射するために
4mmの注射針は

- 皮膚面に対して垂直に
- 根元まで
刺してください。

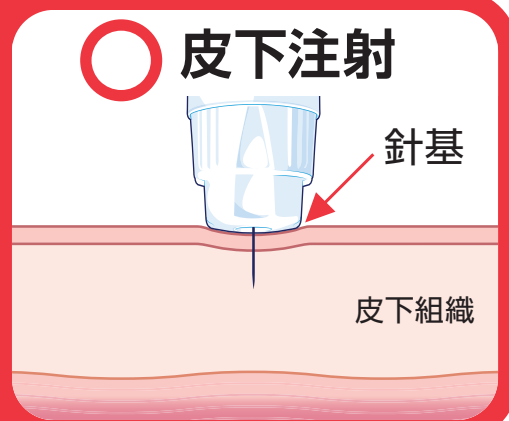


! 適正な注射手技のポイント

平らな針基をハンコのようにペタンと皮膚に貼り付けるように注射してください。

皮内注射になると注射部位が膨れたり、
痛くなったりする可能性があります。


✗ 皮内注射になる可能性があります

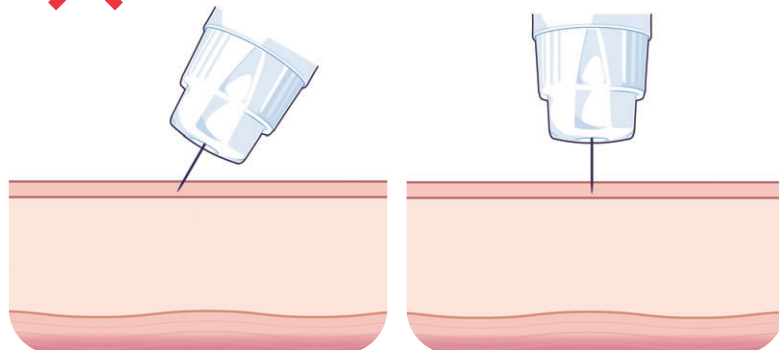

垂直に刺さっていない

根元まで刺さっていない

また、皮膚のつまみあげを
して注射をすると、皮下に
入らず、皮内注射や薬液
漏れの原因になる可能
性があります。

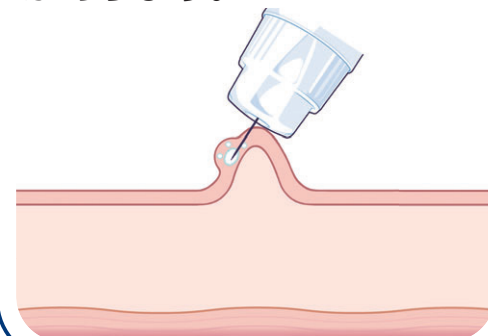

このノボケアニュースは、インターネットで検索して
ご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

🔍 検索