

ノボケア[®] ニュース

No.15



NOVOCARENEWS

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ

**単位合わせダイヤルなどに汚れが付着すると
注入ボタンが押しにくくなります。**

単位合わせダイヤル（単位数字が書かれている部分）や注入ボタンなどに汚れが付着すると、注入時の摩擦力が増加し、注入ボタンが押しにくくなったり、押せなくなったりすることがあります。特に、液体が付着した場合、時間の経過とともに水分が蒸発して、粘性が高まり、摩擦力が増加することがあります。

例 フレックスペン[®]の場合

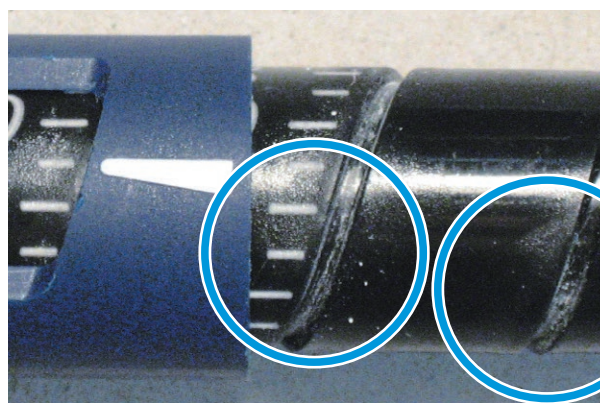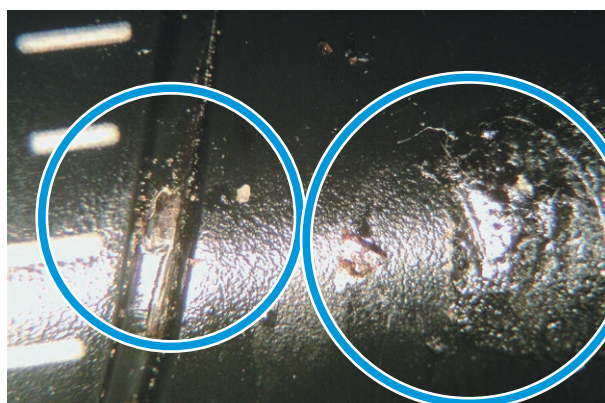

弊社では厳密な品質管理のもとに本製品を皆様のお手元にお届けしております。



汚れや液体などが付着しないように、
ご使用および保管してください。

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。
適正にご使用いただくための資料（ノボケアニュース）を掲載しております。

ノボケアニュース

🔍 検索

