

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.16

NOVO CARE NEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



ノボ ノルディスク ファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。


ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の糖尿病関連製品をご使用の皆様へ

## ゴムピストンとピストン棒の間に隙間が生じる現象について


注射針を装着したまま保管した場合等、液漏れが発生し、ゴムピストンとピストン棒の間に隙間が生じることがあり、正確な注射ができなくなります。

さらに、隙間が生じた状態で注入ボタンが押された場合、ピストン棒先端の円盤が正しい位置から外れることもあります。

### ゴムピストンとピストン棒の間に隙間が生じた例

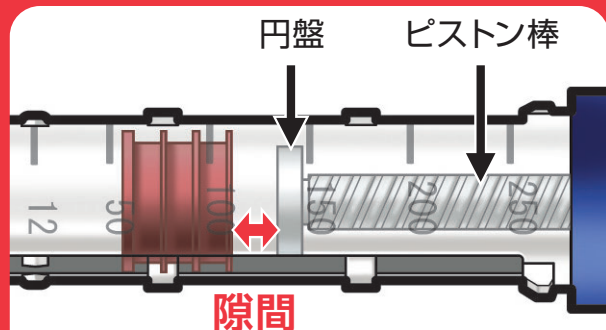

### 円盤が正しい位置から外れている例

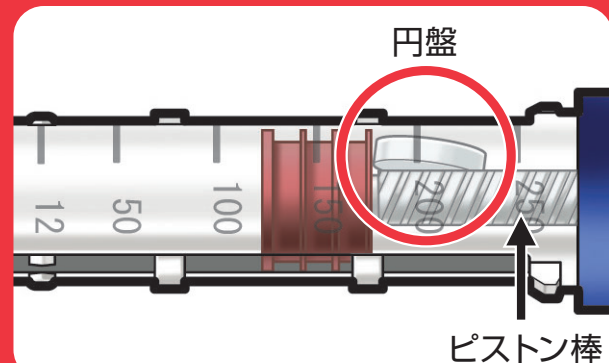

### ■ 隙間が生じる現象を防ぐために

ほとんどの場合、注射針を付けて保管しても隙間は出来ません。

温度変化や輸送中の振動など様々な条件が重なったときに稀に隙間ができることがあります。

薬液の汚染や水分蒸発を避けるためにも、注射直後に注射針を外し、注射直前に注射針を装着してくださいね。



このノボケアニュースは、インターネットで検索してご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

検索