

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.25

NOVOCARENEWS

## ノボペン<sup>®</sup>, ノボペン エコー<sup>®</sup> \*をお使いの方へ

\*ノボペン<sup>®</sup> 4, ノボペン<sup>®</sup> 6, ノボペン エコー<sup>®</sup>, ノボペン エコー<sup>®</sup> プラス

### 本体の塗装の剥がれやダイヤル表示窓の曇りについて

ペンにアルコール綿が長時間接触した場合には、ペンの塗装が剥がれることがあります。また、ペンのダイヤル表示窓にアルコール綿が長時間接触すると、ダイヤル表示窓が曇ることがあります。この場合、設定した単位数が読みとりにくくなります。



① 表面の塗装のしわ



② 塗装の剥がれ



③ ダイヤル表示窓の曇り

#### アルコール綿を袋に入れない



#### アルコール綿を袋に入れる



### 塗装の剥がれやダイヤル表示窓の曇りを防ぐための注意点

- 使用後のアルコール綿は直接ペンに触れないようにしてください。
- ソフトケースの内ポケットに入れる場合でも、使用後のアルコール綿を直接入れないでください。
- 使用後のアルコール綿をペンと同じケースに入れる場合には袋に入れるようにしてください。
- 汚れは、中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。

弊社製品のご使用でお困りなことがございましたら、こちらをご検索ください。  
適正にご使用いただくための資料(ノボケアニュース)を掲載しております。

ノボケアニュース

検索

