

ノボケア[®] ニュース

No.25

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363




ノボ ノルディスク ファーマ製品に関する疑問・質問などは、上記のノボケア相談室にお問い合わせ下さい。


ノボペン[®]4, ノボペンエコー[®]をご使用の皆様へ

本体の塗装の剥がれやダイアル表示窓の曇りについて

ペンにアルコール綿が長時間接触した場合には、ペンの塗装が剥がれることがあります。また、ペンのダイアル表示窓にアルコール綿が長時間接触すると、ダイアル表示窓が曇ることがあります。この場合、設定した単位数が読みとりにくくなります。

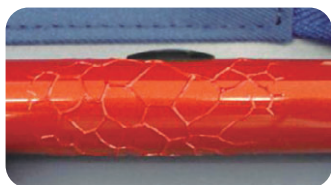

① 表面の塗装のしわ

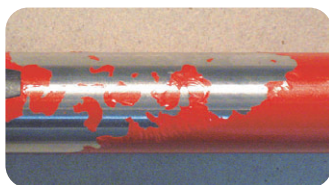

② 塗装の剥がれ



③ ダイアル表示窓の曇り

アルコール綿を袋に入れない



アルコール綿を袋に入れる



塗装の剥がれやダイアル表示窓の曇りを防ぐための注意点

- 使用後のアルコール綿は直接ペンに触れないようにしてください。
- ソフトケースの内ポケットに入れる場合でも、使用後のアルコール綿を直接入れないでください。
- 使用後のアルコール綿をペンと同じケースに入れる場合には袋に入れるようにしてください。
- 汚れは、中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。

このノボケアニュースは、インターネットで検索してご利用いただくことが可能です。

ノボケアニュース

検索