

# ノボケア<sup>®</sup> ニュース

No.24

NOVOCARE NEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



NovoCare



ノボノルディスクファーマ製品について、わからないことや困ったことがある場合は、上記にお問い合わせください。

受付：月曜日から金曜日まで（祝日、会社休日を除く）  
午前9時～午後6時

## ペンニードル<sup>®</sup>をご使用の皆様へ

### ① 針キャップを外す際、針先が針キャップに触れないように真っ直ぐ取り外してください。

針キャップを外す際、針先が針キャップの壁面に接触すると針先が曲がる場合があります。

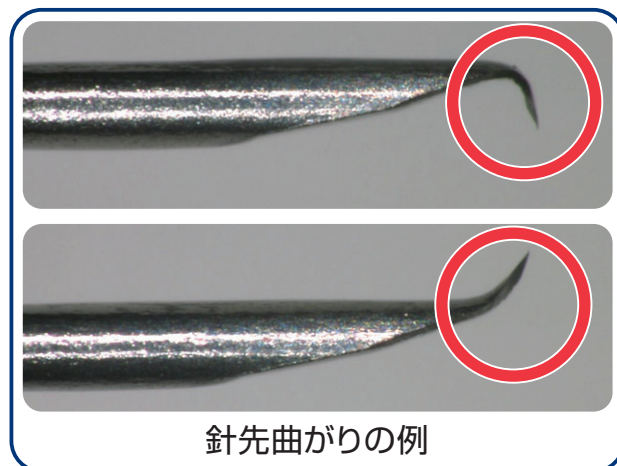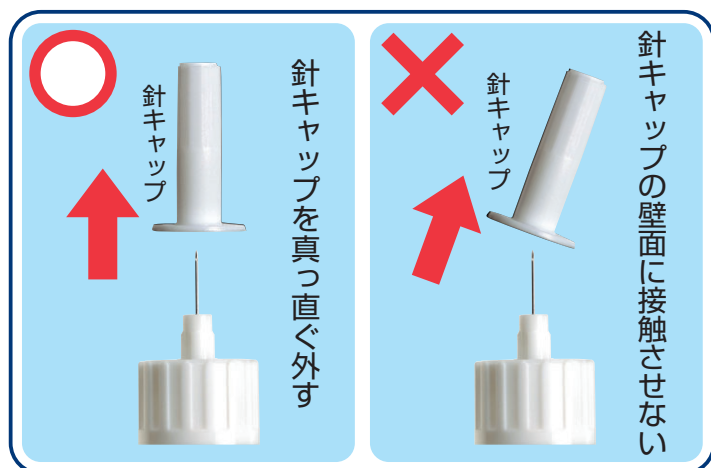

針先曲がりの例

### ② 針キャップの取り外し後は、硬いものに針先を触れさせたり、衣服や注射部位でこすらないように注意してください。

針先は非常に鋭利で繊細なため、わずかな負荷を与えただけでも針先に損傷を与えてしまう可能性があります。

### ③ 上の写真のように針先が曲がっていることに気が付いた場合は、新しい注射針をご使用ください。

針先が曲がっている場合、皮膚に刺しづらく、注射時の痛みや出血のもとになります。